



neodisher® ORTHOVARIO

Tekuté aditivum určené pro ošetření nástrojů procesem Miele ORTHOVARIO



- Hlavní oblast použití:** Určen pro strojní mytí ortopedických a jiných chirurgických nástrojů v kombinaci s alkalickým čisticím prostředkem a přípravkem na bázi aktivního kyslíku v procesu Miele ORTHOVARIO.
- Charakteristika:** neodisher® ORTHOVARIO působí jako zesilovač čisticího účinku během strojního ošetření nástrojů. neodisher® ORTHOVARIO disponuje velmi dobrou čisticí schopností vůči zbytkům krve. Je šetrný k nástrojům z nerez a hliníku. U povrchů z eloxovaného hliníku je třeba nejprve vyzkoušet jejich odolnost.
- Použití a dávkování:** Ve speciálních myčkách: 3 - 5 ml/l.
- Příklad průběhu programu v procesu Miele ORTHOVARIO:
- Předmytí studenou vodou
 - První mycí krok s přípravkem neodisher® ORTHOVARIO při 55 °C
 - Druhý mycí krok s přípravkem neodisher® ORTHOVARIO, neodisher® OXIVARIO a neodisher® FA při 55 - 65 °C
 - Dvojnásobný mezioplach vodou
 - Závěrečný oplach s termickou dezinfekcí při 93 °C po dobu 5 min.
- Následně musí být roztok neodisher® ORTHOVARIO plně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
- Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
- Pouze pro profesionální použití.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm³.
Oblast pH (určena v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 – 5 ml/l: 7 – 9,5
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPa.s.
- Složení:** 5 – 15 % neionogenních tenzidů
konzervační látky (2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol)
- Pokyny ke skladování:** Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.

