



neodisher® OXIVARIO

Tekutý prostředek zesilující čistící účinek na bázi aktivního kyslíku,
určený pro ošetření nástrojů procesem Miele OXIVARIO



- Hlavní oblast použití:** Určen pro strojní mytí chirurgických nástrojů v kombinaci s alkalickým čistícím prostředkem v procesu Miele – OXIVARIO a také Miele – ORTHOVARIO.
- Charakteristika:** neodisher® OXIVARIO je oxidační prostředek na bázi aktivního kyslíku.
- Použití a dávkování:** neodisher® OXIVARIO se používá výlučně jako přísada ve spojení s alkalickým čistícím prostředkem v procesu „OXIVARIO“ nebo „ORTHOVARIO“, vyvinutými a doporučenými firmou Miele. Při použití a dávkování je nutné postupovat dle pokynů firmy Miele a dle snášenlivosti materiálu.
- Následně musí být roztok neodisher® OXIVARIO plně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
- Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
- Po skončení mytí prostředkem neodisher® OXIVARIO je doporučeno ošetření kloubových nástrojů přípravkem neodisher® IP Spray.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³.
Oblast pH (určena v plně demineralizované vodě, 20 °C): 5,7 – 5,5 (0,3 – 0,7 %)
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPa.s.
- Složení:** > 30 % bělicího prostředku na bázi kyslíku (peroxid vodíku)
- Pokyny ke skladování:** Výrobek je citlivý na mraz při teplotách nižších než - 20 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Při správném skladování je doba použitelnosti 1 rok od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.

