



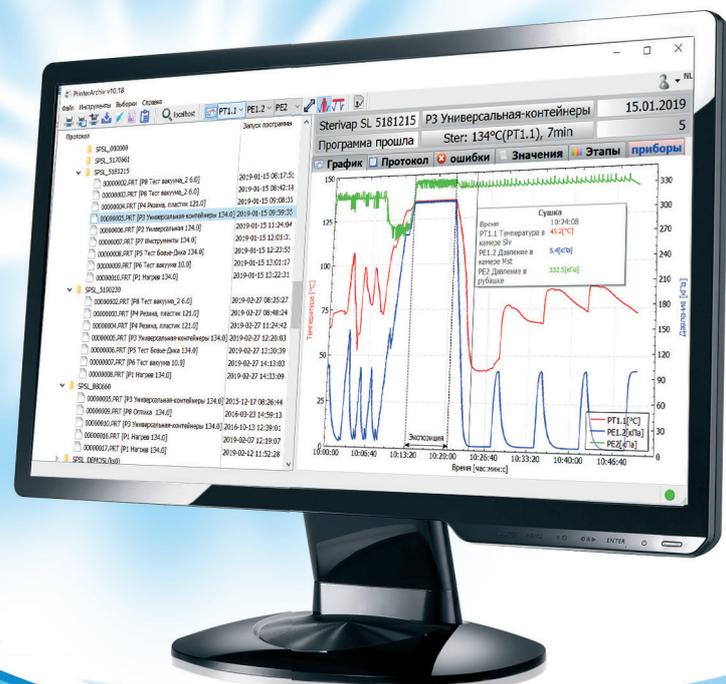

# PrinterArchive

Вспомогательный софтвер  
Для паровых стерилизаторов BMT

Универсальная архивация  
протоколов о стерилизации

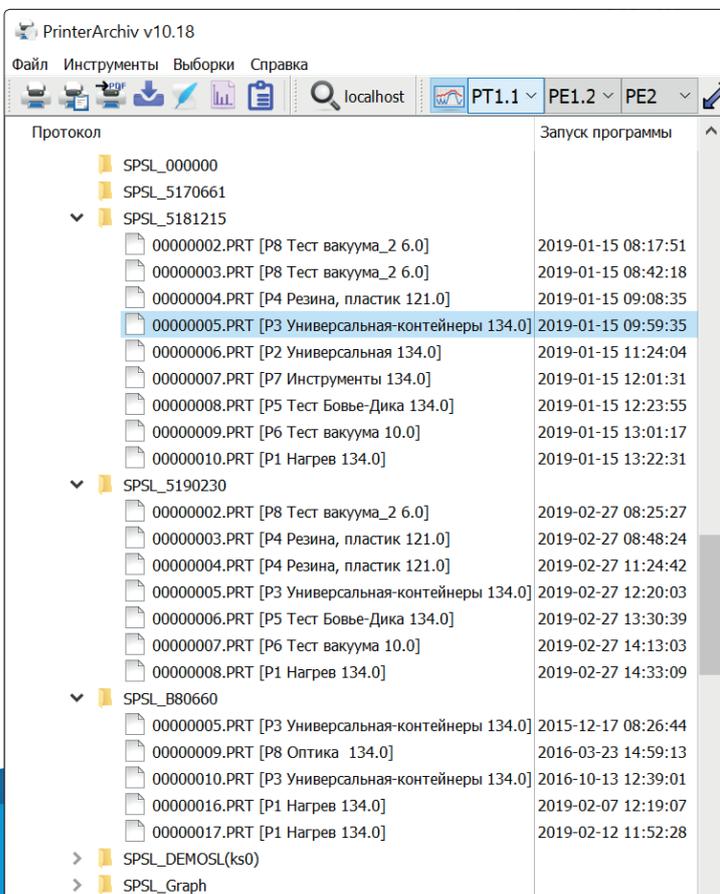

охраняем здоровье людей

# Коммуникационный софтwer PrinterArchive для паровых стерилизаторов BMT

**PrinterArchive** - аппаратный софтwer развитый для универсальной архивации протоколов о стерилизации паровых стерилизаторов в ПК.

**PrinterArchive** - позволяет не только при помощи к стерилизатору добавленного принтера, но также и подключением к Вашему ПК, архивировать и в дальнейшем работать с протоколами о стерилизации.

**PrinterArchive** - является рациональным и значимым решением для центрального мониторинга и записи данных о стерилизации на вашем рабочем месте. **PrinterArchive**


- позволяет далее экспортировать данные в формат PDF или CSV для дальнейшей обработки. Аппараты, позволяющие подключить USB флеш диск, таким образом позволяя экспортировать протоколы в нативном формате ПринтерАрхив, который следом позволяет дальнейшую работу с данными в ПринтерАрхиве.

Касательно аппаратов STERIVAP® и UNISTERI® ПринтерАрхив сверх того способствует посредством е-мэйл коммуникации пересылать предупреждения о только законченной стерилизации, ошибках в течение процесса и других.

У аппаратов типа STERIVAP® и UNISTERI® кроме того позволяет контролировать целостность данных.

**PrinterArchive** - включается немедленно после включения системы, не нужен логин обслуживающего персонала.

**PrinterArchive** - возможно немедленно подключить самостоятельным кабелем к паровым стерилизаторам без каких-либо обработок аппаратов (интерфейс RS232, USB или Ethernet). Програмное обеспечение является оснащением по выбору для всех этих аппаратов.

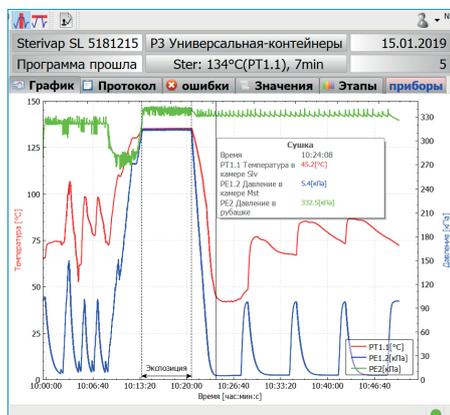


- несложное обслуживание
- операционная система Windows
- простое управление
- центральный мониторинг и запись данных о стерилизации
- возможная подробная работа с графиком, возможно его переместить или сдвинуть
- количество подключенных приборов подчиненно выбору интерфейса, или количеству свободных серийных портов в ПК
- возможное пользовательское исправление заказной системы

- автоматическая синхронизация протоколов с ПК

## Минимальные системные требования

- операционная система Windows 7, Windows 8 или Windows 10
- ethernet, USB или RS232
- системная память 1ГБ
- свободное место на жестком диске 4ГБ

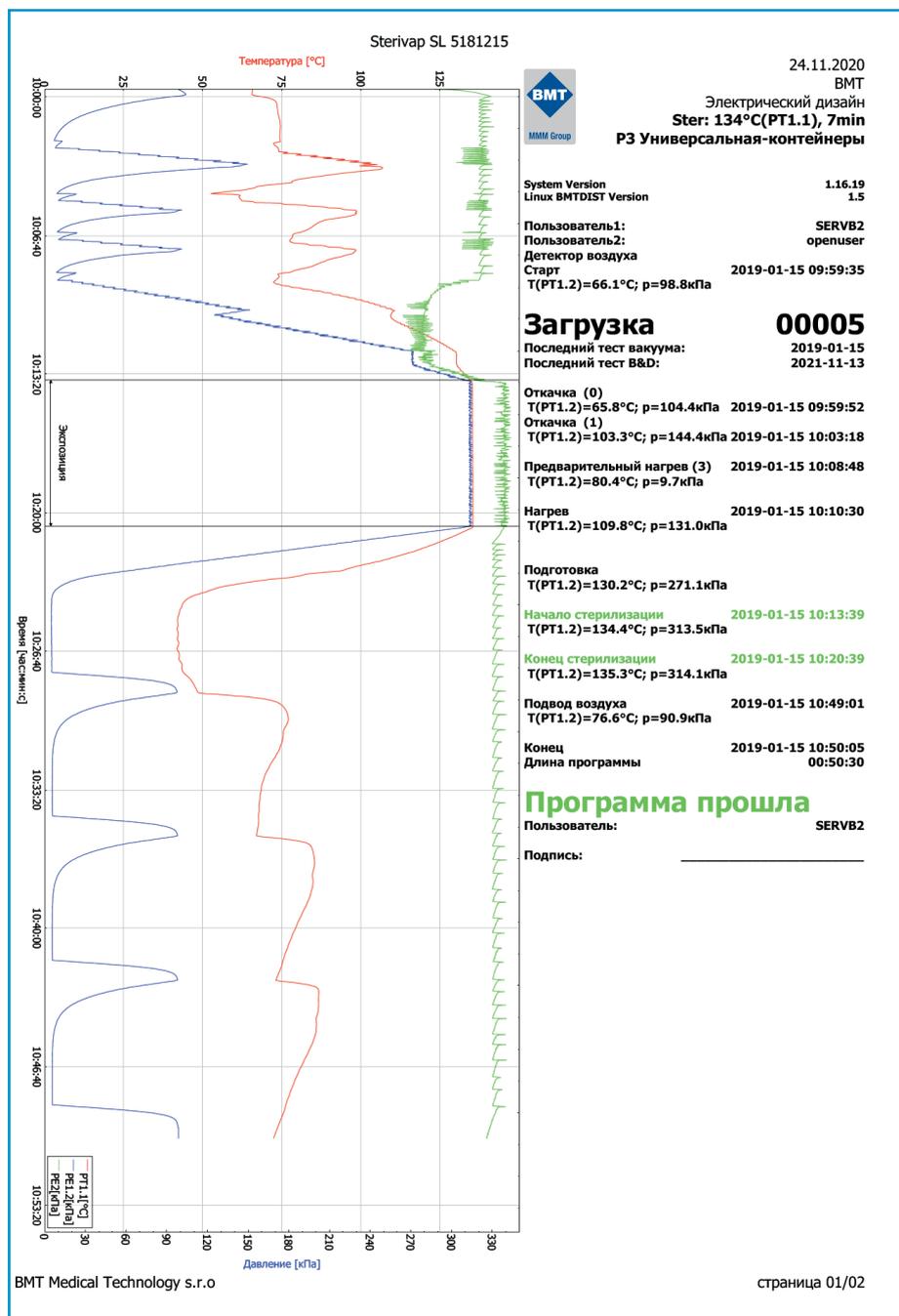

BMT Medical Technology s.r.o.

страница 01/02



BMT Medical Technology, s.r.o.,  
Cejl 157/50, Zábrdovice,  
CZ 602 00 Brno  
Tel.: +420 545 537 111  
fax: +420 545 211 750  
e-mail: mail@bmt.cz  
[www.bmt.cz](http://www.bmt.cz),  
[youtube.com/bmtbrno](https://youtube.com/bmtbrno),  
[facebook.com/bmt.cz](https://facebook.com/bmt.cz)

ООО «БМТ-МММ»  
Московский офис  
тел. +7 (495) 783-86-87,  
783-86-88,  
783-86-89  
119049, г. Москва,  
ул. Шаболовка, д. 23

ООО «БМТ-МММ»  
Новосибирский филиал  
тел. +7 (3832) 23-95-60,  
22-31-74  
630007, г. Новосибирск,  
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223

ООО «БМТ-МММ»  
Ставропольский филиал  
тел. +7 (8652) 23-71-72  
355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова,  
д. 10 «Д», оф. 209

ООО «БМТ-МММ»  
Санкт-Петербургский филиал  
тел. +8 (812) 677-23-46  
197376, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В  
БЦ «Гайот», оф. 102