



neodisher® Mielclear

tekutý, kyselý oplachový prostředek
pro použití v dentálních myčkách

- Hlavní oblasti použití:** Oplachový prostředek pro dentální myčky k přípravě stomatologických nástrojů, vybavení a táčů v zubařských praxích, stejně jako na klinikách pro ošetřování zubů a čelistí.
- Charakteristika:** neodisher® Mielclear ovlivňuje smáčivost nerezů, stejně jako povrchů obtížně smáčitelných umělých hmot. Přidáním kyselin se neutralizují zavlčené zbytky zásad a zásaditá voda.
- Použití a dávkování:** Použití ve speciálních myčkách:
0,2 - 0,4 ml/l, automaticky přes dávkovací přístroj.
Neodisher® Mielclear se přidává do poslední oplachové vody.

Nesměšujte s jinými přípravky.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,05 g/cm³
oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 0,4 ml/l: 4,1 - 3,5
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
- Složení:** < 5 % neionogenních tenzidů
- Pokyny ke skladování:** Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.
- Bezpečnostní opatření:** **UPOZORNĚNÍ: C – Žíravý!**



žíravý

Obsahuje: butylester kyseliny fosforečné > 10 %.

R 34: Způsobuje poleptání.

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).