



neodisher® SBN

Tekutý, kyselý oplachový prostředek určený
pro použití v myčkách podložních mís



BMT
Brněnská Medicínská
Technika a.s.

MMM-Group

Hlavní oblasti použití:

Je užíván jako oplachový a komplexační prostředek pro myčky podložních mís s dezinfekcí parou v oblastech se zvýšenou tvrdostí vody. Určen pro přípravu podložních mís, nádob na moč a nerezových misek v nemocnicích a v domech s pečovatelskou službou.

Charakteristika:

neodisher® SBN je mírně kyselý oplachový prostředek se speciálním složkami pro změkčení vody a nízkou pěnivostí. Díky vynikajícímu odvápnovací schopnosti a smáčivosti jsou oplachované podložní mísy bez skvrn a vápenných inkrustací. Při použití dle instrukcí nevzniká vápenný povlak ve vyvíječích páry ani v potrubí.

neodisher® SBN může být použit pro vodu o libovolné tvrdosti. Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.

Použití a dávkování:

0,5 – 1,5 ml/l v závislosti na tvrdosti vody určené měřicím zařízením. Dbejte na odolnost měřicího systému a vyvíječe páry vůči kyselinám.

V případě velmi silně navázaných usazenin doporučujeme navíc použít speciální čisticí prostředek pro myčky podložních mís neodisher® SBR.

Nesměšujte s jinými přípravky.

Technické údaje:

Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³

Oblast pH (stanovena v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: 3,7 – 3,0

Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas

Složení:

15 – 30 % neionogenních tenzidů
konzervační látky

Pokyny ke skladování:

Přípravek je citlivý na mraz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí

a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.



DR. WEIGERT
CHEMISCHE FABRIK