



neodisher® Septo 2000 neu

tekutý dezinfekční prostředek na chirurgické nástroje a endoskopy,
používá se v ponorných lázních; neobsahuje formaldehyd
baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní a virucidní účinek včetně HBV, HIV
a polio virů



BMT
Brněnská Medicínská
Technika a.s.

MMM-Group

Hlavní oblasti použití: Ruční dezinfekce chirurgických nástrojů, endoskopů, minimálně invazivních nástrojů a anesteziologického vybavení.

Charakteristika: neodisher® Septo 2000 neu je přípravek pro rychlou dezinfekci s baktericidním, fungicidním, tuberkulocidním účinkem a schopností inaktivovat viry. Bez formaldehydu. Obsahuje prostředky pro zlepšení čistícího účinku na bázi tenzidů, nastaven na neutrální pH.

Použití a dávkování: Používán v ponorných lázních, např. v ponorné vaně neodisher® nebo také v ultrazvukových lázních při pokojové teplotě. Voda pro přípravu roztoku musí být demineralizována, je-li použita voda tvrdá, roztok se zakalí. Zakalení se dá odstranit přidáním přípravku neodisher® Z. Doba působení je v závislosti na spektru účinnosti mezi 10 a 60 minutami. Chcete-li prodloužit expozici na několik hodin nebo na celý víkend, použijte přípravek neodisher® Septo SF s čistícími složkami a silnějšími korozními inhibitory. Po uplynutí doby působení je třeba předměty důkladně opláchnout čistou vodou, nakonec změkčenou vodou, aby se zabránilo vzniku skvrn, v případě potřeby je možno je osušit. Před následnou strojní úpravou je třeba dezinfikované předměty opláchnout, aby se zabránilo tvorbě pěny ve stroji.

Nástroje se zaschlými zbytky a přiškvrky (laserová chirurgie) stejně jako se zbytky zubního cementu je třeba předem očistit.

Dodržujte všechny předpisy osobní ochrany. Pro ochranu pokožky je vhodné nosit rukavice.

Nesměšujte s jinými přípravky.

Dávkování: Baktericidní a fungicidní účinek: 5 min. 1,0 %, 20 °C

Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní a virucidní včetně HIV, HBV a Polio virů: 15 min. 6,0 %, 20 °C

Neznečištěný pracovní roztok neodisher® Septo 2000 neu je plně účinný po dobu jednoho měsíce a může být tudíž mnohonásobně opakovaně používán. Objeví-li se viditelné znečištění, měl by být roztok vyměněn.

Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³
Oblast pH (stanovená ve vodě z potrubí, 20 °C) 2 – 4 % roztok: 6,9 – 6,7
Viskozita(koncentrát, 20 °C): < 50 mPas

Složení: < 5 % fosfonátů, anionaktivních tenzidů
dezinfekční účinné látky ve 100 g:
7 g glyoxalu
7 g glutardialdehydu
další složky: butoxyethoxyethanol

Pokyny ke skladování: Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.



UPOZORNĚNÍ: Xn - Zdraví škodlivý!

Obsahuje: glutardialdehyd, glyoxal.

R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
R 37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41: Nebezpečí vážného poškození očí.
R 42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
R 68: Možné nebezpečí nevratných účinků.

S 7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S 23: Nevdechujte páry/aerosoly.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.