



neoblank

speciální přípravek pro ošetřování a promazávání povrchů z nerezů;
aplikuje se roztíráním nebo postřikem bez pomoci pohonného plynu,
neobsahuje fosfáty



- Hlavní oblasti použití:** Pro manuální ošetření a promazání nerezových povrchů, tzn. k odstranění otisků prstů, zbarvení, šmouh od louhů a vody, prachu a mastných skvrn z nerezových povrchů na centrálních sterilizacích, v kuchyních velkých stravovacích zařízeních, stejně jako v provozech potravinářského průmyslu.
- Charakteristika:** neoblank se používá k ochraně, ošetření a promazání nerezových ploch a vybavení. Klouby a panty se budou hladce pohybovat. Nerezové povrchy získají rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled, dosáhne se čistoty povrchů bez otisků prstů, šmouh, skvrn a zbarvení.
- neoblank je bez zápachu, šetrný k materiálu a nejedovatý. Na bázi parafinového oleje DAB. Ochranné filmy se dají čištěním odstranit.
- Použití a dávkování:** Nastříkejte neoblank na nerezový povrch nebo použijte k nanesení hladký hadřík. Mokrý povrch se musí předem osušit, ale vlhké plochy se ošetřovat mohou. Nastříkat pro cílené ošetření zámků, pantů a kloubů. Dávkovat úsporně, používat vhodné rozprašovače (např. nádobu s rozprašovačem viz příslušenství Dr. Weigert).
- Nesměšujte s jinými přípravky.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 0,8 g/cm³
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 100 mPas
- Složení:** < 5 % neionogenních tenzidů
> 30 % alifatické uhlovodíky (parafinový olej)
- Pokyny ke skladování:** Skladujte při teplotách 10-30°C. Při skladování pod 10 °C může dojít k zakalení, které je při vyšších teplotách vratné a nemá vliv na kvalitu produktu. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.