



neodisher[®] SBK

Speciální oplachový prostředek určený
pro použití v myčkách podložních mís

- Hlavní oblasti použití:** Je používán jako oplachový a komplexační prostředek pro mytí podložních mís a močových lahví v myčkách podložních mís s dezinfekcí parou.
- Charakteristika:** neodisher[®] SBK je mírně kyselý oplachový prostředek se speciálními složkami pro změkčení vody a nízkou pěnovitostí. Díky vynikajícím odvápnovacím schopnostem a smáčivosti jsou oplachované podložní mísy bez skvrn a vápenných inkrustací. Při použití dle instrukcí nevzniká vápenný povlak ve vyvíječích páry ani v potrubí. neodisher[®] SBK může být použit pro vodu o libovolné tvrdosti.
- Použití a dávkování:** 0,5 – 1,5 ml/l v závislosti na tvrdosti vody určené měřicím zařízením. Dbejte na odolnost měřicího systému a vyvíječe páry vůči kyselinám.
V případě velmi silně navázaných usazenin doporučujeme navíc použít speciální čisticí prostředek pro myčky podložních mís neodisher[®] SBR extra.
- Nesměšujte s jinými přípravky. Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček. Dodržujte pokyny výrobce myček.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³
Oblast pH (stanovena v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: 3,7 – 3,0
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
- Složení:** < 5 % polykarboxyláty, konzervační látky (methylchloroisothiazolin/methylisothiazolin)
- Pokyny ke skladování:** Skladujte při teplotě 0 – 30°C. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.

